


Instrukcja obsługi najazdów wózka inwalidzkiego

1. **Wymontowanie kanapy fabrycznej 3 rzędu z pojazdu.**
(pozycja obowiązkowa ze względów homologacyjnych oraz bezpieczeństwa)
2. **Wymontowanie najazdów inwalidzkich i ich ustawienie do pozycji umożliwiającej załadunek.**
- odbezpieczenie najazdów (odpięcie zabezpieczenia na górnej części najazdu),




- wysunięcie najazdu do oporu (ogranicznik na obudowie prowadnicy i najazdu),

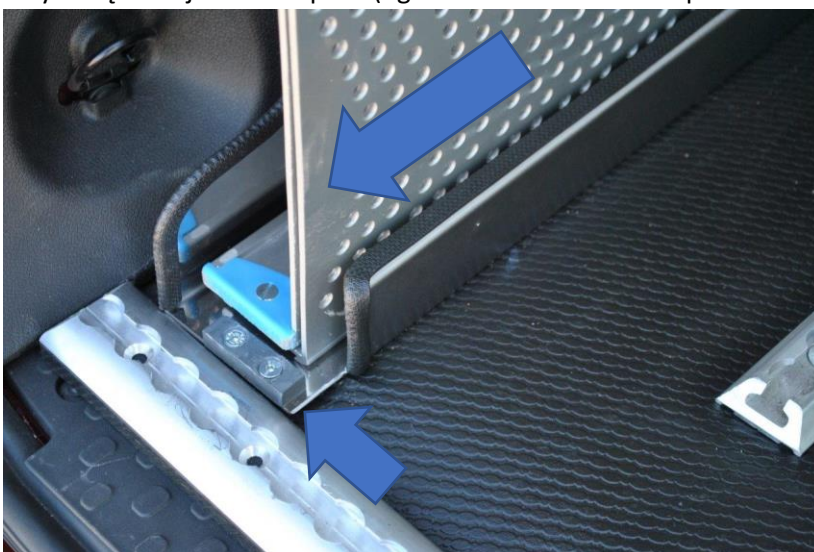

- obrócenie najazdu w kierunku szyny poprzecznej kotwiczącej najazdy podczas załadunku wózka inwalidzkiego,



- ustawianie najazdu na wymaganej pozycji odpowiednio do rozstawu kół wózka, następnie zakotwiczenie poprzez wsunięcie tulei ustalających najazdu w zagłębienia na szynie poprzecznej,

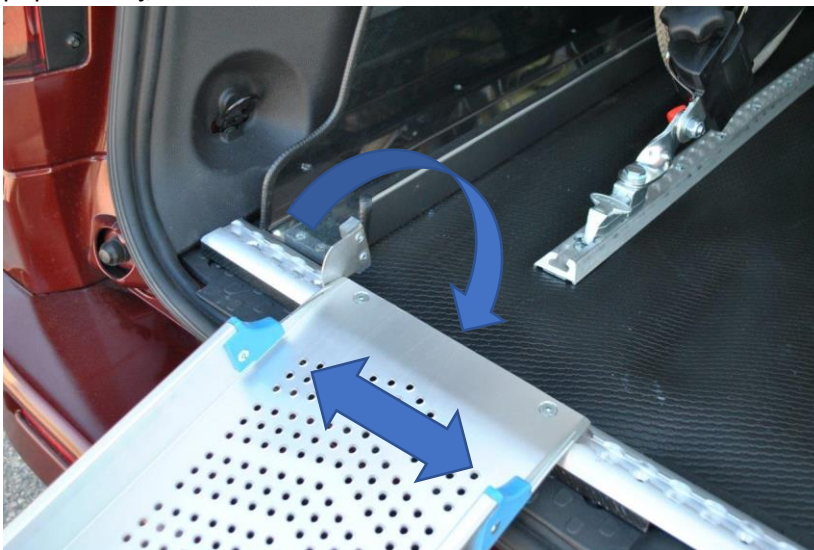

3. Wjazd wózkiem inwalidzkim do pojazdu.



4. Demontaż i złożenie najazdów wózka inwalidzkiego do pozycji transportowej (w kolejności odwrotnej do wymontowania najazdów).

- umieszczenie najazdu odpowiednio po prawej i lewej stronie schowków – najazd tulejami ustalającymi przodek do kierunku jazdy, tuleje ustalające w kierunku osi pojazdu,
- wsunięcie najazdu do oporu,
- zapięcie zabezpieczenia,

UWAGA Nie zapięcie zabezpieczenia może spowodować przemieszczenie najazdu podczas transportu i uszkodzenie osób przewożonych.

5. Kotwiczenie wózka w pojeździe za pomocą pasów inwalidzkich.



Kotwiczenie wózka w pojeździe opisuje osobna instrukcja.